


ANMELDEN

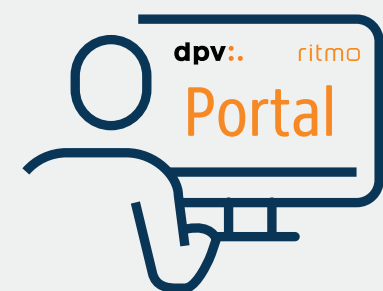

Gehen Sie auf:
<https://portal.dpv-analytics.com>



Login am Portal

- Klicken Sie oben rechts auf **Login**.
- Melden Sie sich anschließend mit E-Mail und Passwort an.

FALL ANLEGEN



- Wählen Sie links in der Navigation **Fälle** aus.
- Die Fallübersicht erscheint.



- Fügen Sie über **+Add** einen neuen Fall hinzu.



- Das Fall-Formular erscheint, füllen Sie bitte alle Felder aus.
- Bestätigen Sie die Fall-Anlage mit Klick auf **NEU**.

AUFZEICHNEN & HOCHLADEN



Datei Upload

- Legen Sie den Ritmo in die Ladeschale.
- Schließen Sie die Ladeschale an Ihren Computer an.

- Suchen Sie in der Fallübersicht den gewünschten Fall und klicken Sie auf das **+**.
- Die Seite „Ritmo Dateien hochladen“ erscheint.



- Klicken Sie auf **BROWSE**, um fortzufahren.



EKG Dateien auswählen und öffnen



Der Ritmo auf der Ladeschale wird als externes Laufwerk mit der Bezeichnung **MEDSET_ATA** angezeigt.

- Wählen Sie aus der Liste alle vorhandenen EKG Dateien aus.
- Bestätigen Sie die Dateien per Klick auf **Öffnen**.

- Die ausgewählten Dateien wurden automatisch übernommen.
- Mit einem Klick auf **UPLOAD** startet der Prozess des Hochladens.



- Der Balken zeigt den Fortschritt des Upload Prozesses an.
- Brechen Sie diesen Prozess nicht ab.

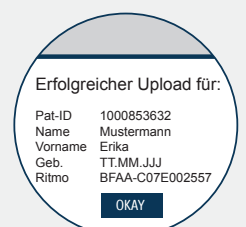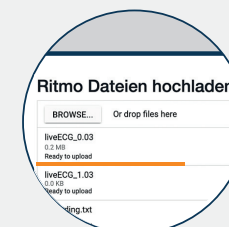

Erfolgreicher Upload

Wenn der Status **UploadSuccess** angezeigt wird, war der Daten-Upload erfolgreich.

BERICHT ERHALTEN



- Suchen Sie in der Fallübersicht den gewünschten Fall.



- Laden Sie die **PDF BEFUND** oder **EKG-ROHDATEN** durch Klicken auf den Link herunter.